

LED šviesos terapijos veido kaukė



Balinimas

Aknė gydymas

Odos stangrinimas

Raukšlių mažinimas

Kova su senėjimu

Sebumo kontrolė

1. LED kaukė

LED veido kaukė veikia fotodinaminiu principu: aktyvuoja odos ląsteles taip skatindama metabolizmo procesus. Kai šviesa pasiekia ląsteles, šviesos energija yra paverčiama tarpląsteline energija, atpalaiduojančia ir stiprinančia kapiliarus bei skatinančia odos fotochemines reakcijas. Gerėja ląstelių apsauginės funkcijos, gerinamas metabolizmas ir ląstelių sintezė.

2. Efektas

LED šviesa padeda efektyviai balinti odą, kovoti su odos senėjimu, skatinti metabolizmą, kraujotaką, kolageno sintezę bei kontroliuoti sebumo išsiskyrimą.

LED veido kaukė turi 7 skirtingas šviesas: raudoną, mėlyną, žalią, geltoną, violetinę, žydrą, baltą. Kiekviena šviesa odą veikia skirtingai, todėl kovoja su skirtingomis odos problemomis.

- **Raudona** – stimuliuoja kolageno sintezę: priešraukšlinis poveikis, taip pat sutraukiamos poros.
- **Mėlyna** – naikina P. acnes bakterijas. Joms žuvus, spuogai išsivalo ir oda pradeda gyti. Mėlyna šviesa taip pat suteikia raminamąjį, priešuždegiminį efektą.
- **Žalia** – mažina odos pigmentaciją, kovoja prieš odos senėjimą, greitina gijimo procesus, šviesina randelius.
- **Geltona** – gerina limfotaką, medžiagų apykaitos procesus. Mažėja odos raudonis, didinamas odos atsparumas.
- **Violetinė** – raudonos ir mėlynos spalvų kombinacija labiausiai padeda kovoti su akne ir randeliais.
- **Žydra** – stimuliuoja ląstelių energijos gamybą, skatinamas metabolizmas.
- **Balta** – giliai įsiskverbia į odą, skatina metabolizmą, šalina pigmentines dėmes, gerina bendrą odos būklę.



proco
PROFESIONALIAM GROŽIUI

LED šviesos terapijos veido kaukė

3. Naudojimas

1. Nuvalykite veido odą, leiskite natūraliai nudžiūti.
2. Išimkite LED kaukę, uždėkite elastines juosteles, išimkite valdymo pultelį, prijunkite USB kabelį prie LED kaukės.
3. Paspaudus įjungimo mygtuką užsidega indikatorius lemputė. Paspaudus **ON/OFF**, LED kaukė pradeda šviesti.
4. Paspaudus mygtuką **COLOR** galima pasirinkti norimą spalvą (spalvos: mėlyna, raudona, žalia, geltona, violetinė, žydra, balta). **TIME** mygtukas leidžia nustatyti norimą laiką (rekomenduojamas laikas – 15-30 minučių). Stenkitės nežiūrėti tiesiogiai į įjungtą LED kaukę. **ENERGY** + ir - leidžia pasirinkti reikiamą šviesos intensyvumą.
5. Pirmiausia uždėkite kaukę ir pritvirtinkite ją su apsaugine juosta, tada įjunkite norimą režimą ir atlikite grožio procedūrą. Procedūras rekomenduojama atlikti klientui esant patogioje pozicijoje (pvz. gulint kosmetologinėje lovoje).
6. LED kaukę galima naudoti kartu su lakštinėmis kaukėmis ir kitomis kosmetikos priemonėmis. Po naudojimo LED kaukę reikia kruopščiai nuvalyti. Pakartotines procedūras galima atlikti su skirtingomis šviesomis, priklausomai nuo individualių poreikių.



4. Įspėjimai

1. Venkite ilgo žiūrėjimo į tiesioginę šviesą. Jei terapijos metu šviesa yra per daug intensyvi, uždenkite akis vatos diskeliais arba uždėkite apsauginius akinius.
2. Naudojant LED kaukę kartu su lakštinėmis aktyviųjų ingredientų kaukėmis aktyvieji ingredientai efektyviau įsigeria į veido odą.
3. Dėl medžiagų, iš kurių kaukė yra pagaminta, pirmą kartą atidarius pakuotę gali jaustis specifinis kvapas, kuris po kiek laiko pranyksta.
4. Luminescencinės plėvelės negalima lankstyti, spausti ar kitaip gadinti.
5. Jei prietaisą naudojate miegamajame kambaryje, prieš miegą idėkite jį atgal į dėžutę arba patraukite toliau nuo lovos.
6. Nedėkite prietaiso į vandenį. Valykite su drėgna servetėle. Elastinė juostelė gali būti plaunama.
7. Nenaudokite korozinių cheminių tirpiklių kaukės valymui.
8. Venkite saulės šviesos.

5. Kontraindikacijos

Nėštumas, mažamečiai vaikai, sergantieji epilepsija, sergantieji skydliaukės ligomis arba vartojantys skydliaukės preparatus, alergiški šviesai žmonės, pacientai su pažeista oda.



proco
— PROFESIONALIAM GROŽIUI —